

Zasady przesyłania **materiałów klinicznych** do KOROUN

Materiał pobrany *post mortem*



1 Wysyłkę uzgodnić telefonicznie z KOROUN.

Pobrany niezwłocznie po zgonie pacjenta, z co najmniej dwóch tkanek/narządów:



krew z komór serca
(1,5 ml)



skrawki śledziony, wątroby, nerek
lub innych zmienionych
chorobowo narządów
(0,5x 0,5 x 0,5 cm)



drobne fragmenty
zmienionej chorobowo skóry



2 Opisać próbki imieniem i nazwiskiem pacjenta (inicjałami), rodzajem materiału oraz datą i godziną pobrania materiału.



3 Przechowywanie do momentu wysłania

1. dzień

7. dzień

> 7. dzień



<7 dni

w temperaturze lodówki



>7 dni

zamrozić w -20°C , **najlepiej w -70°C**
i wysłać zamrożone na suchym lodzie
lub wkładem chłodzącym.



4 Przesłać kurierem w dokładnie opisanych, jałowych i szczelnie zamkniętych pojemnikach/probówkach

(odpowiednia wielkość pojemnika do objętości próbki)



próbki **niezamrożone**
w temperaturze pokojowej



próbki **zamrożone** na suchym
lodzie lub wkładem chłodzącym



UWAGA



Przesyłka musi zawierać poprawnie wypełniony formularz zlecenia badania referencyjnego dostępny do pobrania na stronie ośrodka KOROUN. W przypadku braku wypełnienia formularza lub nieprawidłowo przesłanego materiału KOROUN może odmówić wykonania badania.