

Zasady przesyłania **szczepów bakteryjnych** do KOROUN

1



Przygotować czystą, świeżą hodowlę w dwóch wariantach




płytką Petriego



podłoże transportowe
(wymazówka z podłożem Amies z węglem)

2

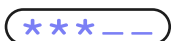

Opisać numerem oryginalnym szczepu

3



Przechowywanie do momenty wysłania



w temp. pokojowej
do 24 godzin



pasażować co drugi dzień
do 7 dni

4



Przesłać kurierem w temp. pokojowej, zabezpieczone przed zgnieceniem

5



Hodowlę kontynuować, aby była możliwość ponownego przesłania szczepu do KOROUN

zleceniodawcy z Warszawy i okolic
do 2 dni

pozostali zleceniodawcy
do 5 dni



UWAGA



Przesyłka musi zawierać poprawnie wypełniony formularz zlecenia badania referencyjnego dostępny do pobrania na stronie ośrodka KOROUN. W przypadku braku wypełnienia formularza lub nieprawidłowo przesłanego materiału KOROUN może odmówić wykonania badania.